

3M Argentina

3M 1863, FFP3: respirador libre de mantenimiento sin válvula



Descripción:

El respirador libre de mantenimiento 3M 1863, de la familia de la Serie 3M 9300, es un respirador exclusivo que ofrece la comodidad y fiabilidad de los respiradores moldeados tradicionales junto con las ventajas de los plegados. Todas sus nuevas características técnicas están patentadas, como, por ejemplo, el material de las bandas de sujeción, que se adapta a cualquier tamaño de cabeza sin aumentar la tensión. Adicionalmente, el material en contacto con la piel es muy suave por lo que la comodidad es mucho mayor.

Aplicaciones:

- fabricación de baterías
- industria farmacéutica
- construcción
- soldadura
- procesos químicos
- astilleros/reparación de buques
- fundiciones de hierro y acero
- remoción de asbestos

Este respirador también están destinado a profesionales sanitarios que requieran el uso de un equipo de protección respiratoria para partículas. Reducen la exposición potencial frente a microorganismos del aire, la sangre y los fluidos corporales.

Materiales:

En la fabricación de este respirador se utilizan los siguientes materiales:

- Bandas de ajuste: elastómero termoplástico rojo.
- Clip nasal: aluminio.
- Material filtrante: polipropileno (medio electrostático avanzado).
- Almohadilla nasal: poliuretano.
- Peso: 10 g

Certificación:

El respirador libre de mantenimiento 3M 1863 cumple los requisitos básicos de seguridad especificados en los artículos 10 y 11B de la Directiva Europea 89/686/CEE. Posee certificado CE de tipo otorgado por el laboratorio notificado BSI y se fabrican con sistema de garantía de calidad en la producción, certificado por el British Standards Institute respecto a la norma ISO9002 (EN29002). Lleva por lo tanto, marcado CE.

Puede ser usado contra microorganismos, incluido el mycobacterium tuberculosis. También cumple los requerimientos de la norma BSI PSA 029 para la resistencia a los fluidos.

El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la certificación IRAM de conformidad de la fabricación y la Marca de Seguridad establecida en las Resoluciones de la S.I.C. y M. (Secretaría de Industria, Comercio y Minería) N°896/99 y N°799/99



Normas:

Este respirador ha sido ensayado de acuerdo con la Norma Europea EN149:2001 y cumple con los requisitos de dicha norma. Debe usarse para aerosoles sólidos, aerosoles líquidos de base acuosa y aerosoles líquidos no volátiles y ofrece protección que se indica FFP3.

3M 1863, FFP3: respirador libre de mantenimiento sin válvula



Utilización:

Este respirador puede pueden usarse siempre que no se excedan las concentraciones de aerosoles sólidos, aerosoles líquidos de base acuosa y aerosoles de líquidos no volátiles que se indican a continuación:


1863: 50 veces el valor límite de exposición

Instrucciones de ajuste:

Deben seguirse estas instrucciones cada vez que se utilice este respirador:

1. El clip nasal está situada en el panel superior. Déle una forma previa doblándolo suavemente por el centro. Sujete el respirador con la mano y tire del extremo del panel inferior para abrirlo.
2. Dé la vuelta al respirador para dejar al descubierto las bandas para la cabeza.
3. Coloque el respirador por debajo de la barbilla y pase las bandas por encima de la cabeza.
4. Ponga la banda inferior por debajo de las orejas y la superior por la coronilla. Ajuste los paneles superior e inferior para mayor comodidad.
5. Con las dos manos, moldee el clip nasal para que se adapte a la forma de la parte inferior de la nariz.
6. Antes de entrar en el área contaminada, hay que comprobar que el ajuste facial del respirador es correcto. Para ello, realice las siguientes pruebas:

Para *respiradores sin válvula de exhalación*: cubra la totalidad del respirador con ambas manos y exhale con fuerza. Si nota fugas de aire por sus bordes, ajústelo de nuevo y vuelva a moldear el clip nasal. Repita la prueba hasta conseguir un perfecto ajuste.

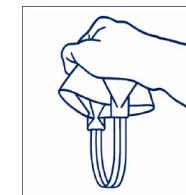

Nota: no utilizar con barba u otro vello facial que pueda impedir el contacto entre los bordes del respirador y la cara.



3M 1863, FFP3: respirador libre de mantenimiento sin válvula

Advertencias:

- Como con cualquier otro equipo de protección respiratoria, el usuario debe ser formado en el uso correcto del equipo.
- Estos respiradores no protegen frente a gases, vapores, disolventes de operaciones de pintura en spray o en atmósferas con deficiencia de oxígeno (< 19,5%).
- Utilizar únicamente en áreas adecuadamente ventiladas que contengan el suficiente oxígeno para mantener la vida.
- No utilizar cuando las concentraciones de los contaminantes sean inmediatamente peligrosas para la vida o la salud (IDLH).
- Abandonar la zona inmediatamente si la respiración se hace difícil o si se sienten mareos u otro malestar.
- Deseche y reemplace el respirador si ésta ha sufrido algún daño, si la resistencia a la respiración se hace excesiva o al final de cada turno.
- Los respiradores nunca deben alterarse o modificarse.

ADVERTENCIA: La protección respiratoria es efectiva cuando se selecciona correctamente, se ajusta y se lleva durante todo el tiempo en que dura la exposición al contaminante.

NOTA: 3M le asesora en la selección de protección respiratoria y le ofrece programas de entrenamiento para ayudarle en el correcto ajuste y utilización de los respiradores.

Para obtener más información comuníquese con:

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Servicio Técnico

Tel. (011) 4339-2429

ecblanco@mmm.com / 3msys0@mmm.com